

Használati útmutató Collacone®

Felszívódó, lokális hemostiptikum
steril
Egyszeri felhasználásra

Sertéscoriumból előállított kollagén

Kölcsönhatások más szerekkel

A kollagén nem alkalmazható klórt (pl. klóramint) felszabadító fertőtlenítő szerekkel, valamint a proteinek módosító tanninnal és causticumokkal együtt.

A kenőcsök, porok, valamint szilikonpreparátumok megváltoztathatják a kollagénfóliák, -vliesek vagy -szivacsok szerkezetét, így a közös alkalmazást ezen anyagok esetében is kerülni kell.

Alkalmazási területek

A Collacone® használata minden olyan esetben indikált, amikor kapilláris, vénás, kis artériás és diffúz vérzések csillapítására van szükség, és amikor a szokásos vérzéscsillapító módszerek elégtelennek bizonyulnak vagy technikailag nehezen kivitelezhetők, időigényesek.

Felhasználás

A Collacone® a fogeltávolítást követően vérzéscsillapításra használható. Fibrinragasztóval együtt történő alkalmazás indikált olyan betegeknél, akiknél fennáll a vérzés veszélye.

- Fogmeder-prezerváció
- Az extrakciós seb vérzéscsillapító ellátása betegeknél, akiknél vérzés veszélye áll fenn
- Arcüregalap-emelés
- Periimplantáris csontdefektusok azonnali implantáció esetén
- A tágulási rés feltöltése csontrepszés (bone splitting) esetén
- Állcsontdefektusok feltöltése (pl. cisztekтомia után)

Alkalmazás módja, adagolás

A Collacone® terméket a steril csomagolás felbontását követően száraz, steril orvosi eszközökkel kell kivenni, majd mull-lapokkal fel kell helyezni és finoman rá kell nyomni a teljesen megtisztított sebfelületre. A termék steril ollóval szükség esetén a kívánt méretre vágható. A Collacone® azonnal a nedves sebfelületre tapad, és gélyszerű kötést alkot a vérrrel. A felesleges vliest el kell távolítani.

Ellenjavallatok

Alkalmazás fertőzött sebtületeken, metil-metakrilát egyidejű alkalmazása, intravazális alkalmazás. Felszívódó vérzéscsillapító anyagok csont- vagy idegfelületeken vagy ezek közelében történő alkalmazása esetén:

- a vérzéscsillapításhoz szükséges lehető legkevesebb mennyiség alkalmazása; és
- az ágens eltávolítása a lehető legnagyobb mennyiségben a sikeres vérzéscsillapítást követően.

Ezáltal csökkenthető az ideg- és lágszöveteknek a felszívódó vérzéscsillapító szer megduzzadása miatt bekövetkező károsodása és/vagy az ágens fragmentumainak migrációja és megduzzadása.

Mellékhatások

Egyes esetekben összeférhetlenségi reakciók lépnek fel a kollagénnel szemben. Alkalmanként fájdalom lép fel a száraz preparátum sebfelületre történő felhelyezését követően. Nagyon ritkán felerősödhetnek a fennálló fertőzések.

Szimbólumok magyarázata/ Szimbólumok



Sugárzással sterilizált



Max. tárolási hőmérséklet



Lejáratí idő



Tételazonosító



Rendelési szám



Megfelelősségi jelölés



Nem alkalmas újrafelhasználásra



Vegye figyelembe a használati útmutatót



Gyártó



Tilos újrasztelizálni



Sérült csomagolás esetén tilos felhasználni